

ЗДРАВСТВУЙ, ДОРОГОЙ НАШ ПОКУПАТЕЛЬ!

Мы с радостью ответим на любой вопрос или обработаем обратную связь по товару, ведь мы очень ценим наших клиентов.

Свяжись с нами в любом удобном мессенджере (Telegram, What'sApp, Viber) по номеру: **+7 (952) 775 74 99**


Carowell

+7 (952) 775 74 99



АЛКОТЕСТЕР

ИНСТРУКЦИЯ
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

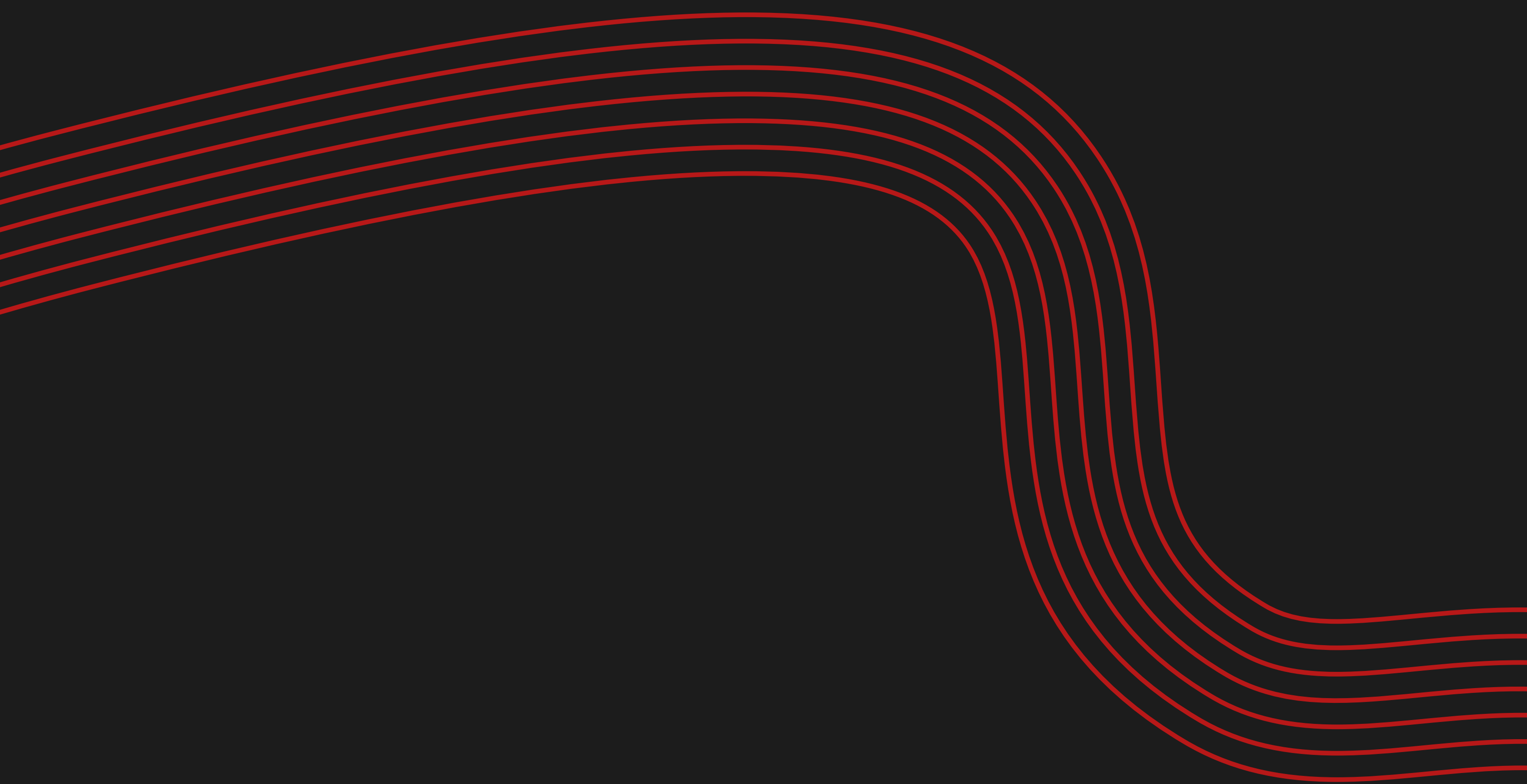

Carowell



Пожалуйста, внимательно прочтите данную инструкцию перед использованием.


Реакция на алкоголь у всех разная, поэтому результаты измерений носят справочный характер и не могут служить заключением об управлении транспортным средством при наличии факта употребления алкоголя.

ОСНОВНОЙ ВИД ПРИБОРА




ЭТАПЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ


- 1 Прополощите рот перед процедурой измерения.
 - ⚠ Не курите и не употребляйте алкоголь как минимум за 20 минут до начала измерений.
- 2 Установите батарейки типа ААА в специальный отсек.
Нажмите и удерживайте несколько секунд кнопку включения .
- 3 После включения алкотестера автоматически включится режим проверки датчика, дождитесь его окончания.

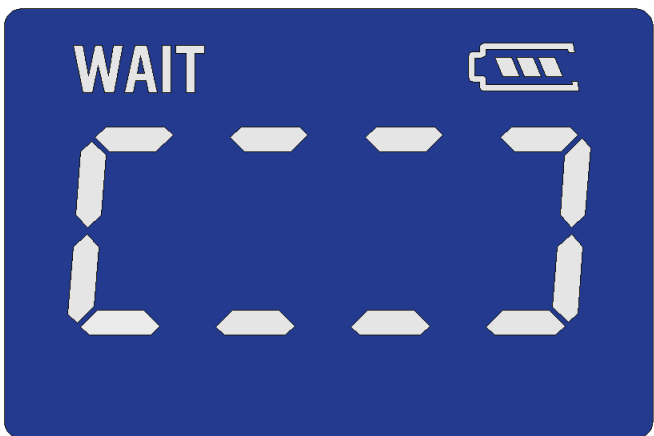

- 4 По завершению проверки на экране загорится надпись BLOW и прозвучит звуковой сигнал. В течение указанного на экране отсчета (25 секунд) выдыхайте воздух в мундштук (5-10 секунд).

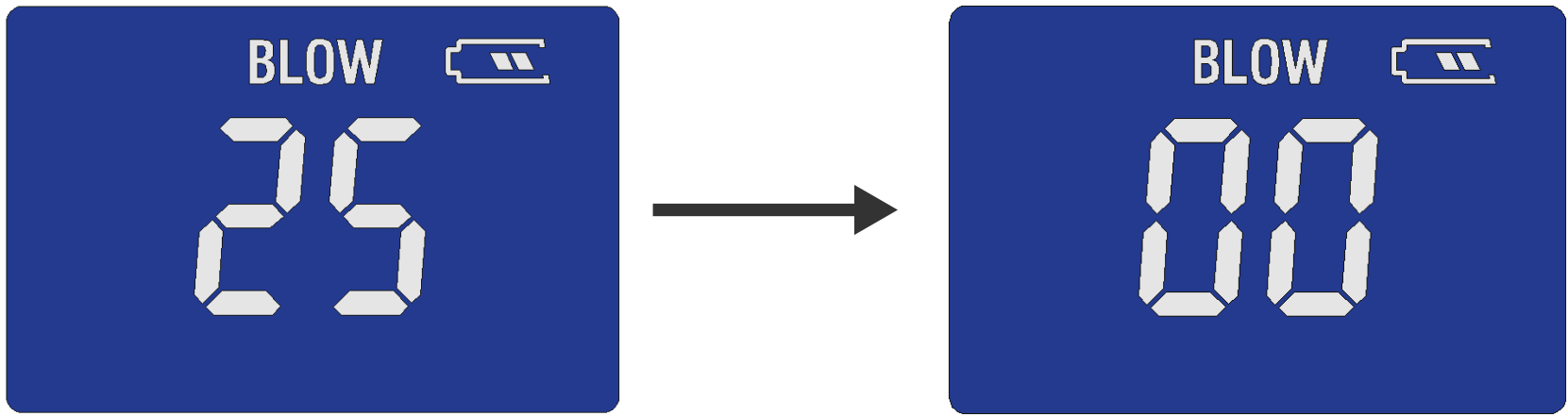

- 5 Во время измерения количества алкоголя в крови на экране появится индикатор процесса. Пожалуйста, прекращайте выдох только после характерного щелчка и продолжительного звукового сигнала, не раньше.

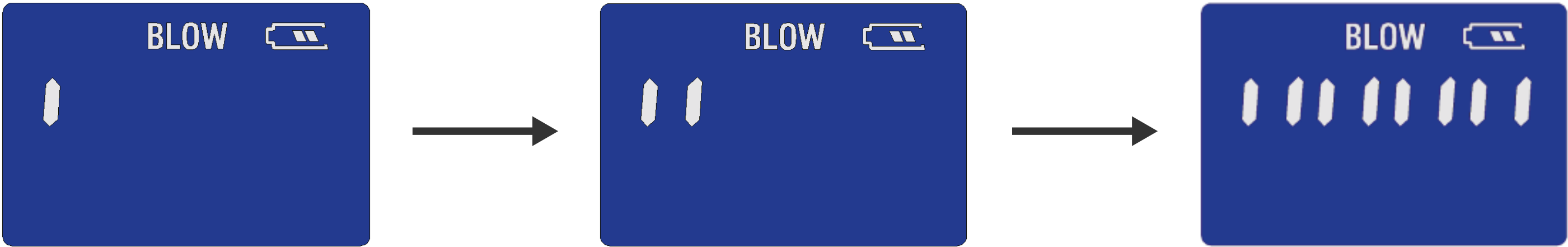

- 6 Ознакомьтесь с результатами измерения на экране.



ПРИМЕЧАНИЕ

Если вы перестанете дуть раньше положенного времени, на экране загорится ошибка ERROR. Для старта нового теста нажмите еще раз кнопку включения  (короткое нажатие).



Старайтесь выполнять медленный и спокойный выдох, чтобы получить корректный результат.

ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ЕДИНИЦ ИЗМЕРЕНИЯ

Нажмите кнопку , чтобы переключить единицы измерения: мг/л, %BAC, ‰BAC.



РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗМЕРЕНИЙ

Если результат теста превышает установленный допустимый диапазон, экран загорается красным светом и звучит сигнал тревоги. За руль садиться категорически запрещено.


Если результат теста входит в допустимый диапазон, экран загорается синим светом.



Диапазон показаний составляет 0.00 ‰BAC — 4.00 ‰BAC.

Значения от 0.00 ‰BAC до 0.05 ‰BAC будут отображаться как 0.00 ‰BAC.

Значения от 4.00 ‰BAC и выше будут отображаться как 4.00 ‰BAC.

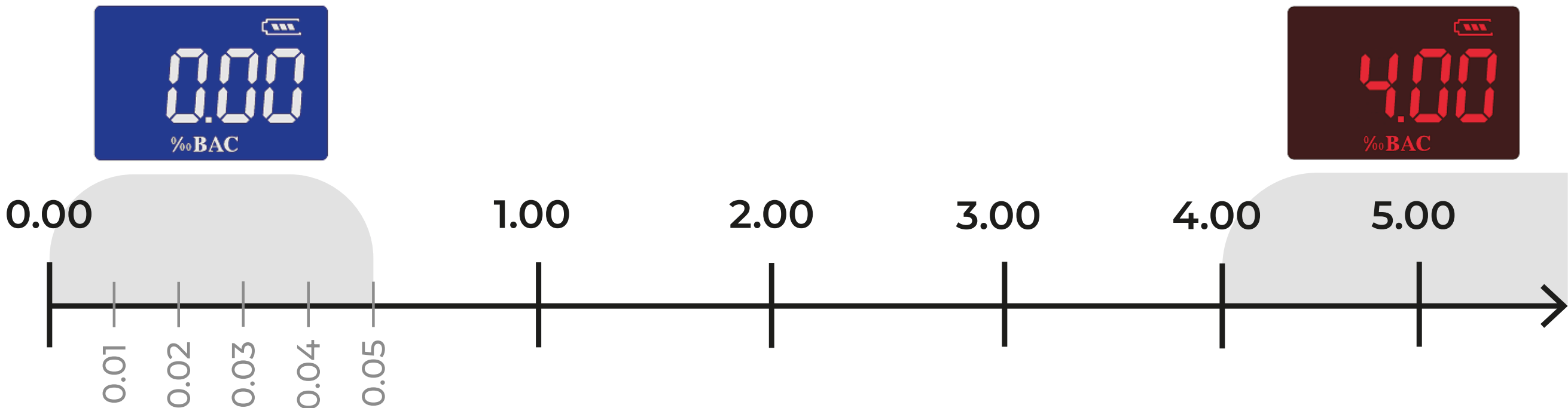


НАСТРОЙКА УРОВНЯ ТРЕВОГИ

⚠ Рекомендуется оставить диапазон b3 для получения корректных данных.

Для изменения уровня тревоги включите прибор. В левом углу загорится надпись WAIT. Выполните два коротких нажатия на кнопку включения, а затем переключайте режимы с помощью кнопки **Ⓜ**.

Диапазоны: b2, b3, b5, b8.

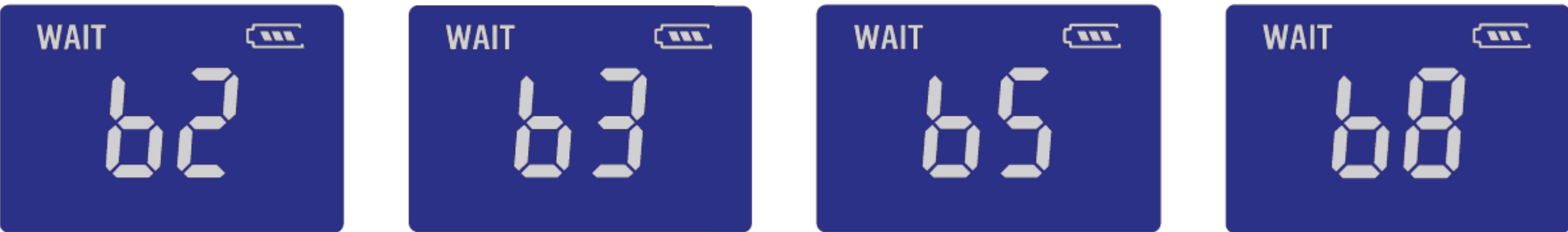

ВНИМАНИЕ

Допустимая норма алкоголя в выдыхаемом воздухе для водителей в 2024 году составляет 0,16 миллиграмма на один литр.

УРОВЕНЬ ТРЕВОГИ	РЕЗУЛЬТАТ ТЕСТА (P)	СТАТУС РЕЗУЛЬТАТА	СПОСОБ СИГНАЛА
b2	$P < 0.20\text{‰BAC} / 0.020\text{‰BAC} / 0.100\text{mg/L}$	нет тревоги	НЕТ ТРЕВОГИ фоновая подсветка экрана синего цвета
	$P \geq 0.20\text{‰BAC} / 0.020\text{‰BAC} / 0.100\text{mg/L}$	тревога	
b3	$P < 0.30\text{‰BAC} / 0.030\text{‰BAC} / 0.150\text{mg/L}$	нет тревоги	
	$P \geq 0.30\text{‰BAC} / 0.030\text{‰BAC} / 0.150\text{mg/L}$	тревога	
b5	$P < 0.50\text{‰BAC} / 0.050\text{‰BAC} / 0.250\text{mg/L}$	нет тревоги	ТРЕВОГА подсветка становится красной
	$P \geq 0.50\text{‰BAC} / 0.050\text{‰BAC} / 0.250\text{mg/L}$	тревога	
b8	$P < 0.80\text{‰BAC} / 0.080\text{‰BAC} / 0.400\text{mg/L}$	нет тревоги	
	$P \geq 0.80\text{‰BAC} / 0.080\text{‰BAC} / 0.400\text{mg/L}$	тревога	

ПРОСМОТР РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ

Алкотестер зафиксирует 50 последних результатов измерений. Для их просмотра удерживайте клавишу **Ⓜ** в течение 2-3 секунд.

ВНИМАНИЕ

При извлечении батареек все сохраненные данные по результатам обнуляются.

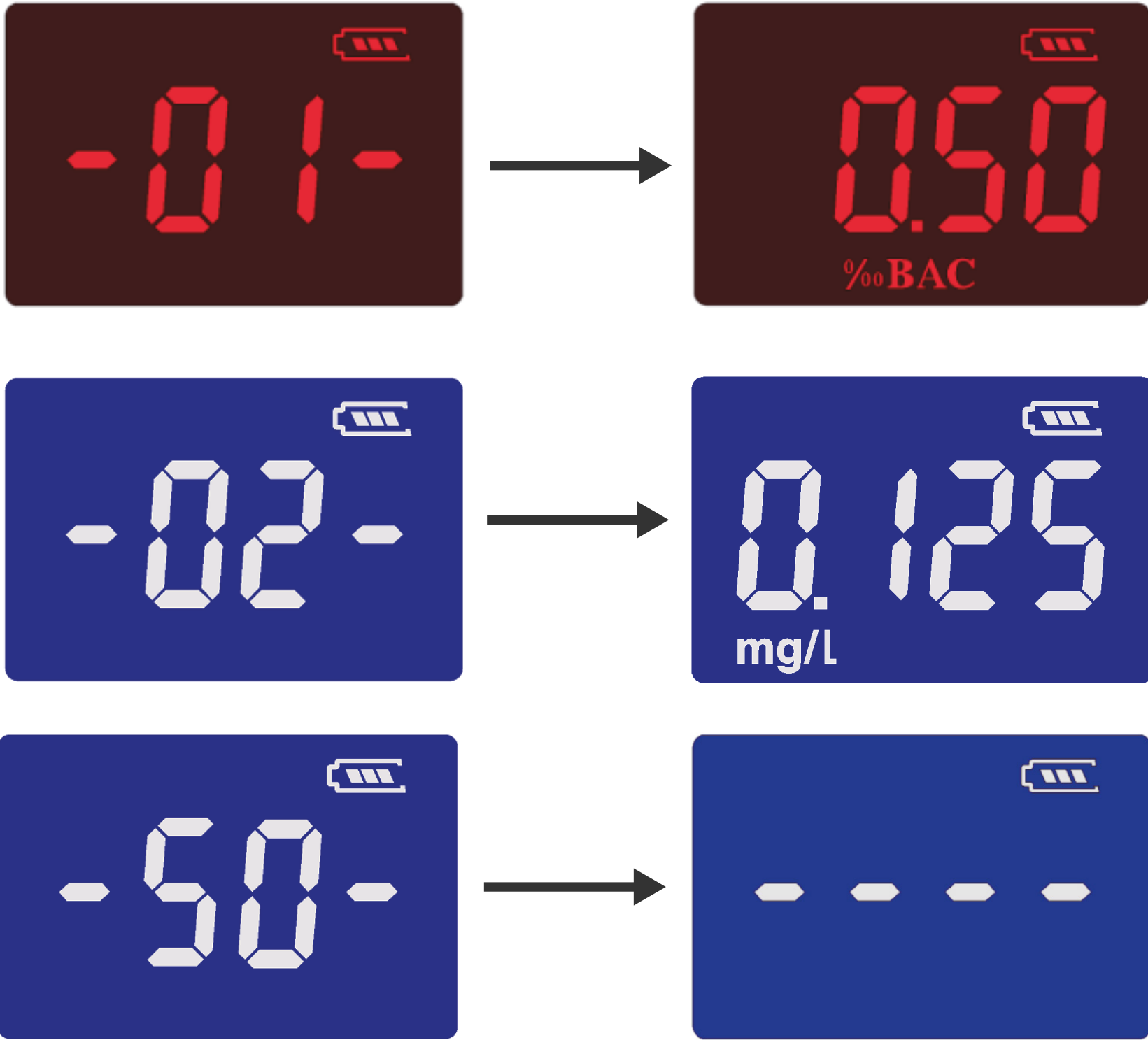


ТАБЛИЦА КОНЦЕНТРАЦИИ АЛКОГОЛЯ

в крови	единица	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	мг/100 мл	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
	%	0.01	0.02	0.03	0.04	0.05	0.06	0.07	0.08	0.09	0.10
	‰	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0
	g l	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0
БЕЗОПАСНО				ОПЬЯНЕНИЕ				СИЛЬНОЕ ОПЬЯНЕНИЕ			

НИЗКИЙ ЗАРЯД АЛКОТЕСТЕРА

Прибор сам просигнализирует вам о низком заряде: на экране появится надпись Lob и прозвучит характерный звуковой сигнал. Надпись будет мигать в течение 10 секунд, а затем алкотестер автоматически выключится. Замените батарейки на новые по типу ААА.



ВНИМАНИЕ

При низком заряде алкотестера данные могут быть некорректны, обязательно замените батарейки после появившейся надписи.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

- 1

Для получения максимально точного результата нужно подождать около 20 минут после употребления алкоголя.
- Повторный интервал между измерениями должен составлять не менее 3 минут.
- 2

Избегайте попадания на прибор агрессивных химических веществ, растворителей и жидкости в приемном отверстии.
- 3

Если тест выполняется при низком заряде аккумулятора, результат может иметь погрешности.
- 4

При высокой концентрации в воздухе паров бензина, растворителя и других веществ результат измерения будет отличаться от фактического значения.
- 5

Не допускайте механических воздействий на алкотестер, это может привести к его поломке или некорректным результатам измерений.
- 6

Для получения максимально точных результатов рекомендуется выполнить измерение 2-3 раза.

ВНИМАНИЕ

Вне зависимости от факта измерения содержания алкоголя в крови и результатов теста производитель и продавец не несут ответственности за управление автомобилем в нетрезвом виде или другую противозаконную деятельность.

ЗА 20 МИНУТ ДО:



НЕ ЕШЬТЕ



НЕ ПЕЙТЕ



НЕ КУРИТЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Датчик	датчик топливного элемента
Размер реакционной пластины датчика	8×8 мм
Время отклика	2-3 секунды
Время выдувания воздуха	около 5 секунд
Диапазон обнаружения	0.00~4.00‰BAC; 0.000~0.400%BAC; 0.000~2.000mg/L; (если коэффициент пересчета между единицами ‰BAC и mg/L равен 2.0, то 0.50‰BAC = 0.050%BAC = 0.250 mg/L)
Чувствительность	0.001 %BAC
Точность датчика	±0.006%BAC при 0.050%BAC; ±0.010 при 0.080%BAC; >0.080%BAC:±12%
Запись	50 записей тестов могут быть сохранены
Оптимальная рабочая температура	0°C ~ 50°C
Температура хранения	-20°C ~ 70°C
Дисплей	около 2,0 дюймов, ЖК-дисплей
Источник питания	2 щелочные батарейки типа ААА
Размеры	115×50×25 мм
Вес	87 гр

ГАРАНТИЯ 3 ГОДА