

ЗДРАВСТВУЙ, НАШ ДОРОГОЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Если вдруг наш товар не устроил - по любой причине - обязательно напиши нам в службу поддержки клиентов через любой удобный мессенджер: Viber, WhatsApp, Telegram по номеру +79087366073. Для звонков и связи +78003507765. Мы с радостью поможем разобраться во всем, научим пользоваться той функцией, которая оказалась непонятна и, конечно же, заменим товар, если в нем обнаружится брак.



 +7 908 736 60 73



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



Пожалуйста, внимательно прочтите данную инструкцию перед использованием. Реакция на алкоголь у всех разная, поэтому результаты измерений носят справочный характер и не могут служить заключением об управлении транспортным средством при наличии факта употребления алкоголя.



Индикатор
питания

Концентрация
алкоголя в крови

Кнопка
включения

Зарядное гнездо
TYPE-C

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

- Для получения максимально точного результата нужно подождать около 20 минут после употребления алкоголя. А повторный интервал между измерениями должен составлять не менее 3 минут.
- Избегайте попадания на прибор агрессивных химических веществ, растворителей и жидкости в приемном отверстии.
- Если тест выполняется при низком заряде аккумулятора, результат может иметь погрешности.
- При высокой концентрации в воздухе паров бензина, растворителя и других веществ результат измерения будет отличаться от фактического значения.
- Не допускайте механических воздействий на алкотестер, это может привести к его поломке или некорректным результатам измерений.
- Для получения максимально точных результатов рекомендуется выполнить измерение 2-3 раза.
- Прибор поставляется с USB-проводом для зарядки. Перед первым применением убедитесь, что аккумулятор полностью заряжен.

ВАЖНО!

После приобретения нового прибора или ввиду длительного отсутствия его эксплуатации необходимо выполнить функцию прогрева несколько раз, так как поверхность датчика может окисляться.

ЭТАПЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- 1

Нажмите и удерживайте кнопку включения в течение 1 секунды, дождитесь звукового сигнала, означающего, что прибор готов к работе.
- 2

Функция прогрева запустится автоматически.
На экране появится надпись **WARM UP** и запустится обратный отсчет от 10 до 0. Пожалуйста, дождитесь окончания этой функции, не предпринимая никаких действий.
- 3

Процесс измерения запустится сразу же после окончания прогрева. На экране появится надпись **BLOW** и начнется новый обратный отсчет от 10 до 0. Сделайте продолжительный выдох, ориентируясь на отсчет на экране с расстояния 10 см. от отверстия.
- 4

Автоматически запустится обратный отсчет еще на 4 секунды, а затем звуковой сигнал оповестит вас о результатах измерения.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗМЕРЕНИЯ

- Зеленый индикатор:** содержание алкоголя (этилового спирта) в крови (САК) составляет $< 0,03\%$ или 0,15 мг.

Факт невозможности управления транспортным средством ввиду алкогольного опьянения не подтвержден.
- Желтый индикатор:** содержание алкоголя (этилового спирта) в крови (САК) $> 0,03\%$ или 0,15 мг., но $< 0,05\%$ или 0,25 мг.

Прозвучит предупреждающий звуковой сигнал. В данный момент управлять транспортным средством нельзя.
- Красный индикатор:** содержание алкоголя (этилового спирта) в крови (САК) $> 0,05\%$ или 0,25 мг.

Прозвучит частый предупреждающий звуковой сигнал. В данный момент управлять транспортным средством нельзя.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Алкотестер высокой точности

Функция: определение уровня алкоголя в крови

Батарея: полимерная батарея


Зарядка: TYPE-C, USB-провод

Размер изделия: 60 мм*38 мм*19 мм

РАСПРОСТРАНЕННЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ

Проблема	Причина	Решение
Не включается алкотестер	Заводской брак	Обратитесь в отдел технической поддержки
Не запускается обратный отсчет для выдоха	Датчик недостаточно прогрет	Выполните функцию прогрева 2-3 раза
Нет результата после выдоха	Скорее всего, вы не соблюдали продолжительность выдоха	Заново прогрейте датчик и выполните выдох согласно обратному отсчету, который появится на экране. Соблюдайте расстояние: 1-2 см.
Результаты появились ДО выдоха	Если прибор новый, могут быть небольшие сбои датчика из-за скопившегося озона на производстве	Выполните прогрев датчика 2-3 раза
Результаты измерений каждый раз разные	Либо вы не соблюдаете обратный отсчет при выдохе, либо интервал между измерениями не превышает 3 минут	Выключите прибор и повторите измерение не ранее через 3 минуты после предыдущего. Рекомендуемый интервал: 20 минут.

ГАРАНТИЯ 3 МЕСЯЦА

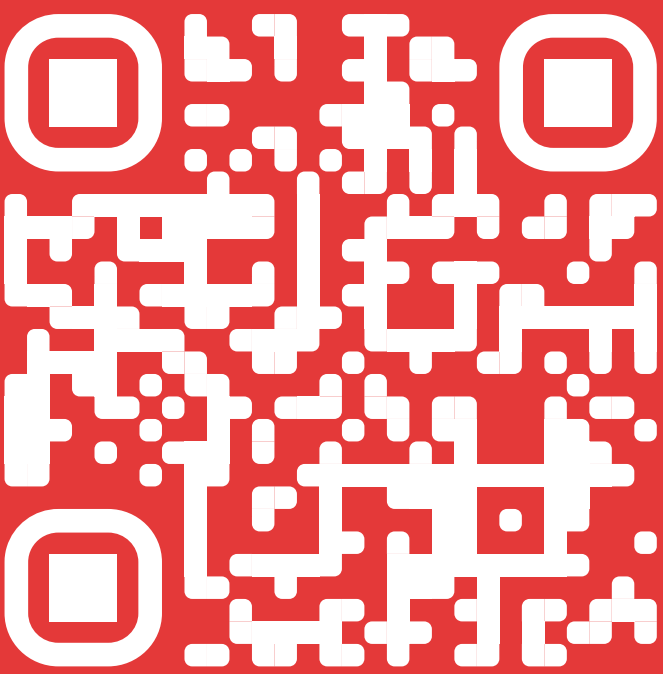

ТЕХПОДДЕРЖКА

Напишите нам в любом удобном для Вас мессенджере.



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ГАРАНТИЯ

Зарегистрируйте товар на сайте www.carowell.ru и получите расширенную гарантию.